

Medical Skin Wipe

Brugsvejledning

Beskrivelse:

Furines **Medical Skin Wipe** er en skånsom alkohol- og parfumefri renseserviet, der er udviklet til:

- at klargøre huden inden påsætning af Furines **Eksternt Fækalkateter**, idet den fjerner overskydende olie og fedtstof fra huden.
- at aftage Furines **Eksternt Fækalkateter** fra huden efter endt brug, idet den effektivt løsner og skånsomt fjerner klæberen fra huden.

Klargøring af hud inden påsætning af kateter:

Riv emballagen over for at åbne den, og fold derefter servietten ud.

Gnid huden med servietten på det område, hvor kateteret skal påsættes.

NB. Man bør **kun** anvende Furines **Medical Skin Wipe** til at klargøre huden – ikke andre kemikalier eller barriere film.

Aftagning af kateter:

Begynd med at løsne lidt i en kant af **Eksternt Fækalkateter**.

Gnid med en **Medical Skin Wipe** på huden langs klæbekanten, imens produktet nænsomt løsnes.

Brug evt. mere end én til aftagning af kateteret.

Efter at fækalkateteret er taget helt af, bør huden renses efter for klæberester med en wibe.

NB. Man bør **kun** anvende Furines **Medical Skin Wipe** til at fjerne klæberen – ikke andre klæbefjernende vaskemidler.

Indikationer:

Furines **Medical Skin Wipe** er indikeret til at klargøre huden inden påsætning af Furines **Eksternt Fækalkateter**, eller andre klæbende produkter fra Furine.

Furines **Medical Skin Wipe** er indikeret til at opløse og fjerne klæberester ved aftagning af Furines **Eksternt Fækalkateter**, eller andre klæbende produkter fra Furine.

Kontraindicationer:


Furines **Medical Skin Wipe** bør ikke bruges, hvis man har allergi over for indholdsstoffet.

Furines **Medical Skin Wipe** bør ikke bruges på brudt hud eller åbne sår.

Indeholder Siloxaner



Læs først
brugsvejledningen

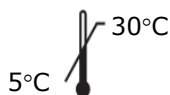

Single
Use



Se primær
emballage



Se primær
emballage

REF A00DK10



Furine ApS
3400 Denmark

IFU version 1.0



Furine