

CURAPAX® varmepute for smertelindring

Forebygge hypotermi: Pasienten bør holdes varm for å forebygge postoperative komplikasjoner som: risiko for sårinfeksjon, nedsatt sårtilheling, blødningstendens og energi ved muskelskjelvinger(Lindahl&Selldèn.2000 og haug, Sand,& Sjaastad,1992).

CURAPAX® gir følgende fordeler:

- En effektiv oppvarming som medfører kortere liggetid på post operativ avdeling. Pasienten gjenvinner fortore normaltemperatur.
- Mindre bruk av smertestillende.
- Høyere pasientkomfort.
- Ingen risiko for krysskontaminering.

Informasjon om hypotermi:


Oppholdet på postoperativ forlenges med opp til 26% for hypotermipasienter sammenlignet med pasienter med normal kroppstemperatur.

Hypotermi har en dokumentert effekt på kroppens medisinmetabolisme og forlenger effekten av de medikamenter som brukes i forbindelse med anestesi.


Selv ved kirurgiske inngrep av kortere varighet ses hypotermi.

Fakta om hypotermi på postoperativ avdeling:

- Hypotermi(35-36°C) kan være en risiko for postoperative komplikasjoner.
- 19% fikk flere sårinfeksjoner(Kurz, Sessler og Leunardt.(1996).
- 4% fikk flere trykksår
- 8% flere hadde behov for blodtransfusjon
- 21% flere fikk sirkulatoriske problemer
- Andre komplikasjoner er: Nedsatt sårtilheling, økt blødningstendens, frysninger, og nedsatt komfortopplevelse.

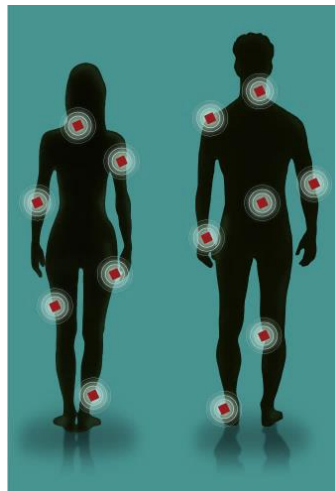

BRUKSANVISNING CURAPAX®

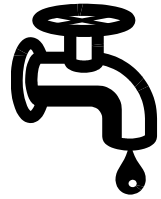

CURAPAX SOM VARMEPUTE:



1. Fyll Curapax® med varmt vann
2. Snu Curapax® opp ned, så ventilen "låser". Fjern overskytende vann
3. Klem evt. litt på Curapax® og fordel gelen. Se på varmeindikator. Curapax® er klar til bruk
4. Curapax® kan eventuelt varmes i mikrobølgeovn eller i varmeskap

CURAPAX SOM KJØLEPUTE:



1. Fyll Curapax® med kaldt vann
2. Snu Curapax® opp ned, så ventilen "låser". Fjern overskytende vann.
3. Klem evt. litt på Curapax® og fordel gelen. Curapax® er klar til bruk.
4. Curapax® kan eventuelt kjøles ned i kjøleskap

ADVARSEL:

Hvis overskudsvann ikke blir fjernet, kan det lekke vann/gel ut.

Ved overoppheting kan puten bryte, ta derfor puten forsiktig ut av mikrobølgeovnen.

Værforsiktig ved bruk til pasienter med nedsatt følsomhet.

Curapax® kan trygt kastes i alminnelig husholdningsavfall.

