




**1** Rengjør og tørk den perianale huden før påsetting av **Furine Eksternt Fekalkateter**.


- **Ikke bruk** rengjøringsmidler som inneholder olje eller kremer.
- **Ikke bruk** Cavilon eller lignende barriere produkter.
- Sørg for at huden er helt tørr.

Bruk **Furine Medical Skin Wipe** til slutt for å oppnå best mulig feste.

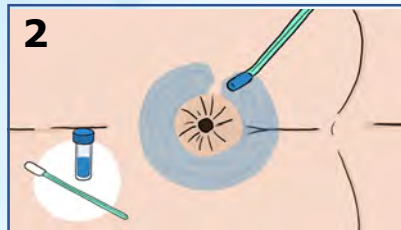

**2** Påfør **Furine's Klebende Barrierefilm** rundt anal-åpningen i en bredde på 2,5 -3 cm. Bruk medfølgende swab-pinne.

**NB: Bruk hele beholderen.**

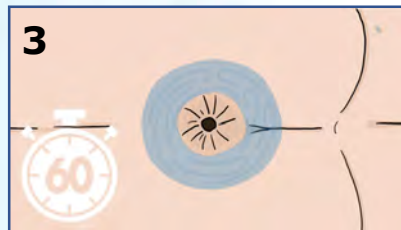

**VIKTIG:**

La **Barrierefilm**en tørke i 1-1½ minutt, hold rumpeballene adskilte.

Anbefaler å være to sykepleiere.  
**Hvis barrierefilm**en ikke er tørr når katetret festes er det økt risiko for lekkasje og løsning av kateter.



**4** Fjern beskyttelsesfilmen fra **festeplassen**. Produktet holdes på plass i applikatoren ved å klemme i platens vinger.



**5** Med hjelp av den blå applikatoren påsettes **festeplassen**.

Sett **festeplassen** ned mot patientens anal åpning på den blå **barrierefilm**en.



**6** Trykk festeplassen godt på plass.

