



Kvikguide

aftagning af klæber fra hud

- Begynd med at løsne lidt i en kant af **Furine Eksternt Fækalkateter**
- Gnid med **Furine Medical Skin Wipe** på huden langs klæbekanten, imens produktet nænsomt løsnes
- Brug evt. mere end én wipe til aftagning af et kateter
- Efter fækalkateteret er taget helt af, skal huden renses efter for klæberester med en wipe
- NB: man kan **kun** anvende **Furine Medical Skin Wipe** til at fjerne klæberen – ikke andre klæber-fjernende vaskemidler