


Instruksjoner for oppbevaring og rengjøring


Vennligst les disse instruksjonene før bruk. Hvis du er i tvil, vennligst ta kontakt med ditt sykehus eller rekvirent.

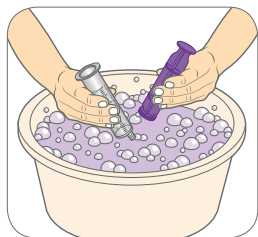


1. Demonter sprøyten i to deler. Vask begge delene grundig i hånd-varmt såpevann. Vær spesielt oppmerksomhet på å fjerne spor av mat eller medisiner fra sprekker eller hjørner.



2. Skyll grundig med kaldt vann fra springen for å fjerne alle spor av såpevann. Kontroller hver del grundig og forsikre deg om at alle delene er rene

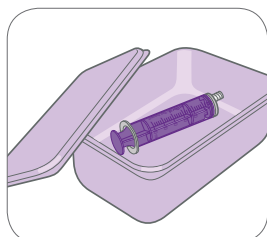

3. Rist gjenværende skyllvann av sprøyte delene og la det lufttørke. Ikke monter våte komponenter. Når sprøyten har tørket, monteres sprøyten igjen og oppbevares i en ren, tørr beholder med lokk.

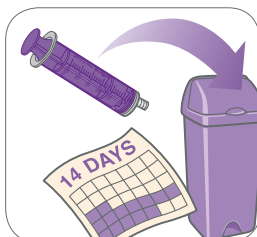

4. Sprøyten kan rengjøres og gjenbrukes opptil seks ganger per dag men ikke mer enn 14 dager.

Enteral ISO-Saf Home-sprøyter er beregnet til bruk og gjenbruk av en person og kan rengjøres og gjenbrukes opptil seks ganger per dag i maksimalt 14 dager.

Spor av mat eller medisin som får tørke og herde på sprøyten er vanskelig å fjerne ved rengjøring. Av denne grunn, **bør sprøyter som skal gjenbrukes, rengjøres umiddelbart etter bruk.**

Forholdsregler:

- Ikke bruk sprøyten hvis stemplet ikke beveger seg jevnt og lett
- Ikke bruk sprøyten hvis det er synlig skade på stemplet eller sprøyten.
- Kast sprøyten hvis doseringsmarkeringene på siden ikke lenger er klar og lett å lese.

Følg retningslinjer og anbefalinger fra ditt lokale sykehus eller behandlingshjelpemidler.



Administrasjon av medisiner / mat og / eller skylling



Aspirasjon av mageinnhold og/eller luft